

Contec® Professional Guía para una limpieza adecuada

Cómo saturar y limpiar con ContecClean™ Toallitas azules:



1. Monte el cubo (PRCN0005) colocando la tapa.
2. Retire la lengüeta que rodea la tapa.
3. Etiquete el cubo con el nombre del desinfectante aprobado por la instalación correspondiente.



1. Cuente una pila de aproximadamente 25 toallitas (PRMW1213A).
2. Coloque la pila de toallitas en el cubo.



1. Llene una botella de 32 onzas con desinfectante debidamente diluido y aprobado por el centro.
2. Vierta con cuidado el frasco de desinfectante sobre la pila de toallitas; asegúrese de saturar todas las esquinas.
3. Deje que las toallitas absorban el desinfectante y se saturen por completo durante 1-2 minutos.



1. Limpie las superficies con movimientos unidireccionales, siempre en la misma dirección.
2. Superponga ligeramente cada pasada para garantizar una cobertura uniforme del desinfectante y evitar que queden zonas sin cubrir.



1. Utilice todos los lados limpios de la toallita. El pliegue natural en cuatro partes crea 8 lados limpios y frescos en cada toallita.
2. Tome una nueva toallita cuando la toallita ya no dispense líquido de manera uniforme. Siempre tome una nueva toallita cuando la anterior esté excesivamente sucia.
3. Utilice siempre toallitas diferentes para el paciente baño.



1. Tire la toallita usada y sucia a la basura.
2. Siga siempre los procedimientos adecuados para la eliminación de residuos biológicos peligrosos (sangre, fluidos corporales, etc.).

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: El siguiente documento tiene como objetivo servir como herramienta para proporcionar documentación sobre competencias y en ningún caso certifica la información que contiene. Las instalaciones deben seguir sus propias directrices, políticas y procedimientos, que, en todos los casos, tendrán prioridad sobre este documento de capacitación.

PCA080_LAES | 102425

Copyright © 2025 Contec, Inc. Todos los derechos.